




VERRASSEND
PRAKTISCH

Gebruiksaanwijzing Actreen[®] Mini^{set}


Enmalige katheter voor vrouwen met opvangzak

Actreen® Mini set


Gebruiksaanwijzing

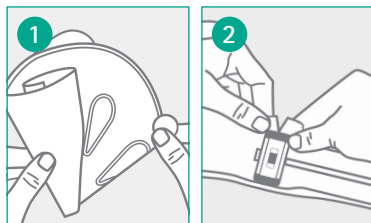



- Was zorgvuldig je handen en genitaliën.
- Verwijder de witte sticker op de achterzijde en vouw de set open.
- Scheur de verpakking open langs de scheurlijn ter hoogte van het verbindingsstuk en haal de katheter eruit.

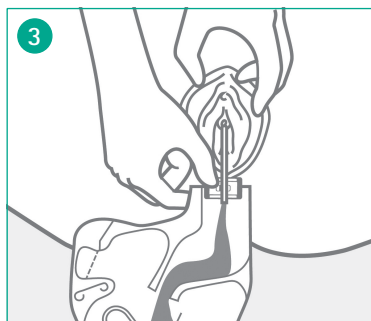

- Duw met één hand je schaamlippen uit elkaar om de plasbuis vrij te maken. Gebruik je andere hand om de katheter voorzichtig door de plasbuis in te brengen totdat de urine begint te stromen.
- Wacht tot de urine stopt met stromen. Druk zacht op je onderbuik om er zeker van te zijn dat de blaas volledig leeg is.
- Trek de katheter voorzichtig uit de plasbuis.

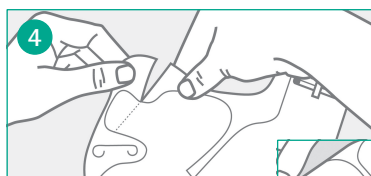

- Leeg de opvangzak voordat je de set weggooit.
- Scheur de opvangzak open langs de scheurlijn aan de zijkant en laat de urine weglopen.

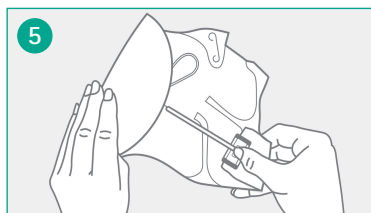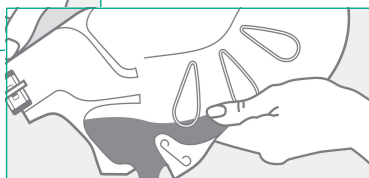

- Vouw de katheter naar binnen en rol de opvangzak op. Plak de set dicht met de sticker.
- Gooi de set weg bij het plastic afval, deze is recyclebaar.
- Was zorgvuldig je handen.

Actreen® Mini set

Productinformatie

Voordelen

- Je blaas legen wanneer er geen toilet in de buurt is
- Je ziet hoeveel je plast door opvangzak met maataanduiding
- Opvangzak neerleggen na katheriseren, loopt niet leeg
- Geen vlekken op je kleding, direct gebruiksklaar
- Vleugels voor goede grip en sturing
- Blijft 60 minuten glad na opening
- No-touch verpakking voor optimale hygiëne
- Gemakkelijk meenemen, past in je mouw of broekzak



Maat	Besteleenheid	Artikelnummer	Z-index
■ CH10	30 stuks	239010K	15948633
□ CH12	30 stuks	239012K	15948692
■ CH14	30 stuks	239014K	15948676

PSST... ik ben er ook zonder opvangzak!

Actreen® Mini^{Cath} is handig voor gebruik op het toilet.



www.bbraun.nl/actreen

Maat	Besteleenheid	Artikelnummer	Z-index
■ CH8	30 stuks	228008K	16776089
■ CH10	30 stuks	228010K	15597849
□ CH12	30 stuks	228012K	15597857
■ CH14	30 stuks	228014K	15597865
■ CH16	30 stuks	228016K	16776097