



Preoperatieve lichaamsreiniging

Draag bij aan jouw eigen veiligheid
voorafgaand aan een operatie

Bereid je voor op een ziekenhuisopname


Bacteriën op het lichaam van gezonde mensen zijn heel normaal en ongevaarlijk. Maar er zijn situaties en omstandigheden, vooral tijdens een ziekenhuisopname, waar deze micro-organismen ernstige infecties kunnen veroorzaken. Je kunt bijdragen aan jouw eigen veiligheid door preventieve maatregelen te nemen.

We raden dekolonisatie van het hele lichaam aan met Prontoderm®, bedoeld om:

- je voor te bereiden op een ziekenhuisopname of chirurgische ingreep;
- de kiembelasting op je huid en in je haar te verminderen, mond en neus (dekolonisatie);
- herkolonisatie te helpen voorkomen door een langdurig antimicrobiële barrièrewerking;
- het risico te verkleinen dat je behandeling in het ziekenhuis wordt uitgesteld vanwege bacteriële op je huid.

Toepassing

We raden aan om vier dagen voor je ziekenhuisopname of operatie te beginnen met de laatste reiniging van de dekolonisatiecyclus op de dag van de operatie. Stem de dekolonisatiemaatregelen af met je behandelend arts. De producten moeten worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing in de productverpakking.

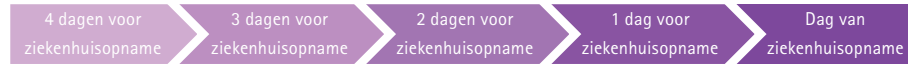

1x
per dag



Dekolonisatie van lichaam en haar

Breng Prontoderm® Foam één keer per dag na het wassen van je lichaam en haar met je gebruikelijke douchegel of shampoo. Prontoderm® Foam is een leave-on product en het wordt aangeraden om dit na het douchen op een droge huid te gebruiken omdat je de foam niet afspoelt.

3x
per dag



Dekolonisatie van de neus

Reinig de neus en verwijder eventuele hardnekkige korsten. Breng drie keer per dag Prontoderm® Neusgel aan.

3x
per dag



Dekolonisatie van mond en keel

Poets je tanden drie keer per dag en spoel daarna met Prontoral®.

We raden aan door te gaan met de lichaamsreining van het hele lichaam tot één week na je operatie.

Meer informatie
op onze website



Video:
preoperatieve lichaamsreining
met Prontoderm®

