



Easypump® II

Medicatie via thuisinfusie en actief
blijven?

Easypump® II

Een oplossing voor medische behandelingen thuis

Thuis jouw mobiliteit behouden wordt eenvoudiger met Easypump® II.

Thuis kunnen zijn is de beste therapie. Daarom heeft je zorgverlener gekozen voor een slim infuussysteem: Easypump® II van B. Braun.

Deze elastomeer infuuspomp vormt een flexibele oplossing voor zowel korte als langdurige infuusbehandelingen, zoals een antibioticakuur of chemotherapie.

In deze folder vind je de antwoorden op jouw vragen over dit infuussysteem. Aarzel niet om contact op te nemen met je zorgverlener als je nog vragen hebt.

Jouw voordelen als patiënt – maximaal comfort

Naast de keuze van de juiste behandeling is herstellen in een vertrouwde omgeving ook van belang voor jouw welzijn als patiënt. Easypump® II ondersteunt dit principe.

- Klein en licht en aan het einde van de infusie weer helemaal plat.
- Kortere ziekenhuisopname, weer eerder thuis.
- Hoeft geen belemmering te zijn voor jouw dagelijkse activiteiten.



Productomschrijving

Easypump® II

1. Beschermkap: veilige bescherming van de vulpoort.
2. Buitenbeschermlaag: beschermt het elastomeer membraan.
3. Elastomeer membraan: reservoir voor de medicatie en tegelijk een bron van de druk.
4. Flowrestrictor: zorgt voor een constante en betrouwbare afgifte van de medicatie.
5. Open/dicht klem: om de infusie te starten en te stoppen.
6. Filter: verwijdert lucht en deeltjes.
7. Veilige en comfortabele patiëntconnector.

Werkingsprincipe Easypump® II

Easypump® II is een elastomeer infuussysteem voor de toediening van medicatie. Het werkingsprincipe van Easypump® II is eenvoudig: een elastomeer membraan (ballon) wordt gevuld met medicatie. Door de elastische druk wordt de medicatie vervolgens door de toedieningslijn 'geduwd'. Een flowrestrictor (de inwendige diameter van de toedieningslijn na de filter) zorgt voor een constante en betrouwbare afgifte van de medicatie.



Veelgestelde vragen



Werkingsprincipe

Hoe weet ik dat de pomp werkt?

De elastomeer ballon zal geleidelijk leeglopen naarmate de medicatie wordt toegediend. Dit proces kan zeer langzaam verlopen, dus mogelijk merk je niet meteen een verschil.

Hoe weet ik wanneer de toediening afgelopen is?

De medicatie is volledig toegediend wanneer de ballon helemaal is leeggelopen.



Reizen

Kan Easypump® II in een vliegtuig gebruikt worden?

Ja dat kan, maar de infusiesnelheid kan afwijkend zijn. Raadpleeg jouw arts of zorgverlener indien dit relevant is voor de behandeling.



Douchen

Kan ik douchen met Easypump® II?

Ja, in het algemeen is dit mogelijk. Vraag toch in elk geval verdere instructies aan jouw zorgverlener.



Slapen

Zal Easypump® II barsten als ik er per ongeluk op ga liggen?

De pomp zal niet barsten onder normale omstandigheden. Toch raden wij je aan om de pomp niet onnodig onder hoge druk te plaatsen (bv. op de pomp slapen of zitten).



Omgeving

Hebben de weersomstandigheden invloed op mijn behandeling (kan ik bijvoorbeeld naar buiten gaan)?

Je kunt naar buiten gaan. Weersomstandigheden zoals temperatuurschommelingen, rechtstreekse uv-straling of een zeer hoge luchtvochtigheid kunnen de infusie beïnvloeden. Vraag je zorgverlener om advies over jouw specifieke omstandigheden.



Tolerantie

Bevat Easypump® II latex?

Nee, Easypump® II bevat geen latex.

Opmerking:

Als je vermoedt dat jouw pomp niet correct werkt, sluit dan de klem en neem contact op met je zorgverlener.

Easypump® II

Thuis gebruiken

Mobiel blijven

- Easypump® II is klein en licht.
- Easypump® II werkt volledig los van de zwaartekracht en heeft geen stroom nodig.
- Easypump® II is ideaal voor ambulante behandelingen, waarbij je jouw normale activiteiten kunt blijven uitvoeren.

Opmerking:

Je arts of zorgverlener zal je inlichten over jouw behandeling en de medicatie die je toegediend krijgt.

Let erop dat....

- er niets lekt uit de pomp of de toedieningslijn;
- de lijn niet geknikt of geblokkeerd is;
- het filter onbedekt blijft;
- de flowrestrictor (het laatste stukje lijn na de filter) steeds in contact blijft met je huid;
- kinderen niet spelen met de pomp.



Kijk voor meer informatie op www.easypump.nl of scan de QR-code.



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.