


INTROCAN SAFETY® – IV KATHETER

PRAKTISCHE ADVIEZEN

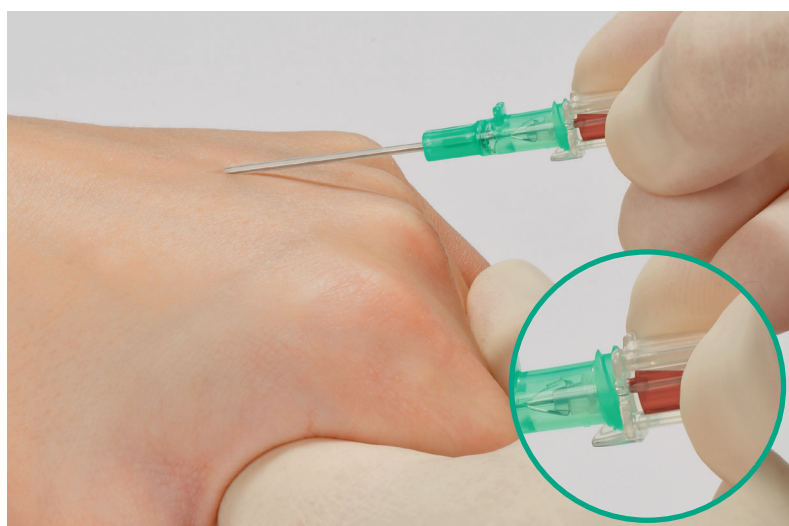

VOORBEREIDING

1. Kies een plaats om aan te prikken, geschikt voor klinische toepassing.
2. Kies de juiste maat (Gauge en lengte) van de intraveneuze katheter.
3. Verwijder de beschermkap door een voorwaartse beweging. Niet draaien aan de hub van de intraveneuze katheter, dit is niet nodig.
4. Trek de naald niet terug voor het aanprikken.

AANPRIKKEN EN OBSERVEREN

1. Trek de huid voorzichtig strak.
2. Prik onder een hoek van minimaal tot maximaal 35 graden.
3. Observeer de eerste flashback van bloed in de flashbackkamer (A).



AFDRUKKEN EN STABILISEREN

1. Druk het bloedvat dicht en stabiliseer de katheter om verplaatsing uit het vat te voorkomen.
2. Trek met een vloeiende, rechte beweging de naald uit de hub. Het passieve, automatische veiligheidsmechanisme dekt de naaldpunt af (D).
3. Werp direct de naald in een afval/naalden container.

LET OP:

- Steek nooit een teruggetrokken naald terug in de katheter vanwege kans op beschadigingen of ontstaan van een embolie.
- Wanneer een venapunctie niet lukt verwijder dan eerst de naald waardoor het veiligheidsmechanisme activeert. Daarna kan de katheter verwijderd worden.



EERSTE FLASHBACK

1. Laat de intraveneuze katheter zakken tot deze parallel loopt aan de huid. De minimale aanprikhoek is niet meer van toepassing.
2. De eerste flashback is zichtbaar in de flashbackkamer (B).



AANSLUITEN

Sluit een toedieningssysteem of afsluitdopje aan op de hub van de intraveneuze katheter (E).



TWEEDE FLASHBACK

1. Gebruik de gripplaat om de katheter iets op te schuiven, 3 tot 5 mm.
2. Observeer de tweede flashback van bloed, zichtbaar tussen de katheter en de naald (C). Het zien van de tweede flashback bevestigt dat de katheter in het bloedvat zit.
3. Na deze bevestiging kan de stuwband af of losser gemaakt worden.
4. De katheter mag verder naar voren opgevoerd worden.



FIXEREN

Fixeer de intraveneuze katheter met een IV pleister met een transparant gedeelte waarbij de insteekopening altijd zichtbaar is (F).

