





MIETHKE M.blue plus[®]

Overzicht instelbare waarden
'gravity-assisted' hydrocephalusshunt

MIETHKE M.blue plus[®]


Overzicht instelbare waarden 'gravity-assisted' hydrocephalusshunt

Met M.blue plus[®]-instrumenten kunnen gebruikers het drukk niveau op de instelbare gravitational unit (0-40 cmH₂O) van M.blue[®] en het drukk niveau op de instelbare differential pressure unit (proGAV[®] 2.0) meten, controleren en aanpassen.

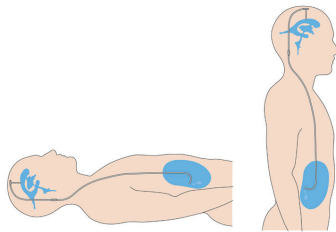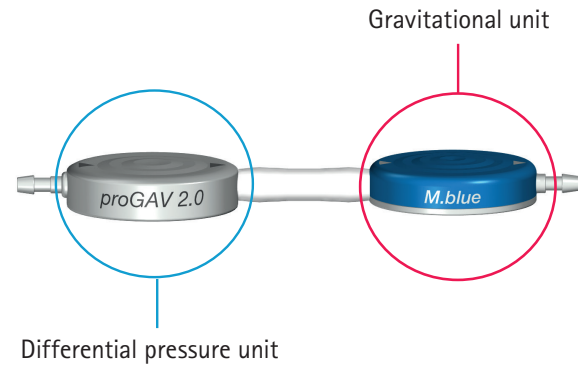

Differential pressure unit (proGAV[®] 2.0)

0-20 cmH₂O

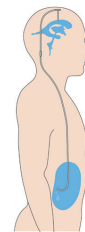


Gravitational unit (M.blue[®])

0 - 40 cmH₂O




Lokaliseren

Lokaliseer de shunt door het gebied met je vinger te palperen via de opening in het M.blue plus[®]-kompas.

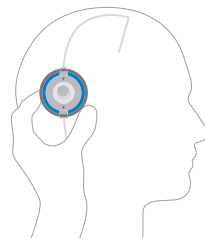

Controleren

Sluit het M.blue plus[®]-kompas en gebruik de vlotter om de locatie te vergrendelen en de huidige instelling van de klependedruk af te lezen.

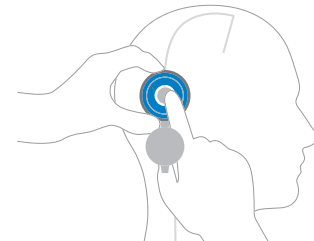

Aanpassen

Met behulp van de ingebrachte afstelling kan de klependedruk eenvoudig op het gewenste niveau worden ingesteld. Na het instellen is het raadzaam om de drukkinstellingen nogmaals te controleren.

B. Braun Medical B.V. | +31 (0) 412 672 411 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.



Milieuvriendelijk drukwerk