





MIETHKE M.blue®

Overzicht instelbare waarden
'gravity-assisted' hydrocephalusshunt



MIETHKE M.blue[®]

Overzicht instelbare waarden 'gravity-assisted' hydrocephalusshunt

M.blue[®] is een positieafhankelijke hydrocephalusshunt. Deze bestaat uit een instelbare gravitational unit en een vaste differential pressure unit. De combinatie van deze twee eenheden zorgt voor een automatische aanpassing van de openingsdruk, afhankelijk van de lichaamshouding van de patiënt. Dit vermindert het risico op mogelijke complicaties door overdrainage, vooral in een rechtopstaande en actieve lichaamshouding. Unieke en compromisloze drukaanpassing om de individuele behoeften van de patiënt te optimaliseren.

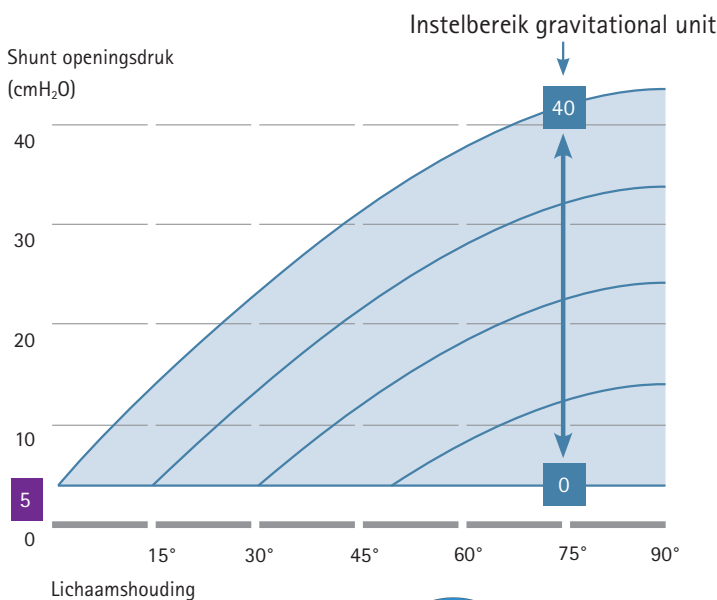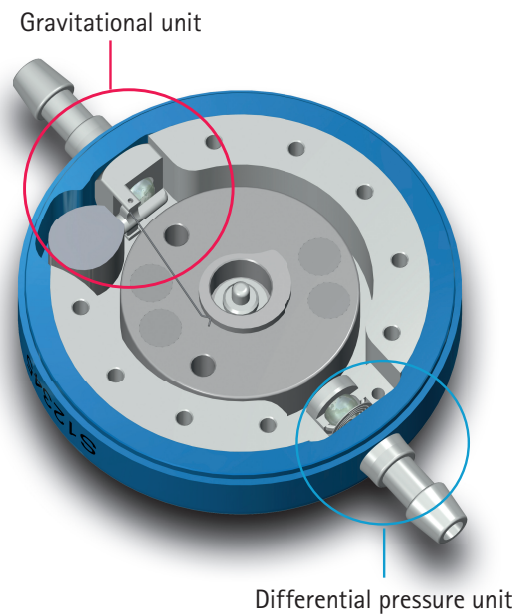

De gravitational unit en de differential pressure unit werken samen wanneer de patiënt staat.

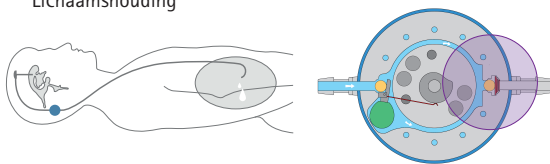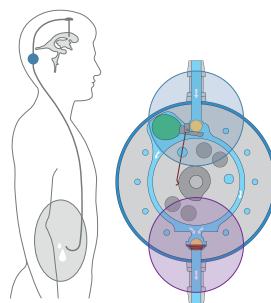

Alléén de differential pressure unit is actief wanneer de patiënt ligt.

Differential pressure unit

0 cmH₂O

5 cmH₂O

10 cmH₂O

15 cmH₂O

Gravitational unit

0 - 40 cmH₂O

0 - 40 cmH₂O

0 - 40 cmH₂O

0 - 40 cmH₂O

B. Braun Medical B.V. | +31 (0) 412 672 411 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.



Milieuvriendelijk drukwerk