



Urimed[®] Vision

Externe katheter voor mannen

Verbeter de kwaliteit van leven van
jouw patiënten met incontinentie


Als continëntieprofessional zie je regelmatig mannen met incontinentie. Deze klachten beïnvloeden de levenskwaliteit van deze groep patiënten aanzienlijk en hebben ook impact op de gezondheidszorg in het algemeen.

Wist je dat?

423 miljoen

mensen over de hele wereld worden getroffen door urine-incontinentie.^[1]

Maar 22 %

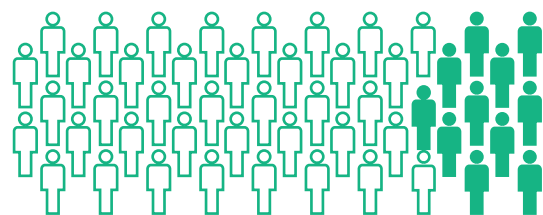

van de getroffen mannen **zoekt hulp** voor hun symptomen.^[2]

Onbehandelde incontinentie kan leiden tot onnodige ziekenhuisopnames en kosten voor de gezondheidszorg

1,4 tot 2,1 van 100.000 mannen met urine-incontinentie (UI) hebben een ziekenhuisopname nodig van 3,0 tot 4,2 dagen.^[3]

De jaarlijkse kosten voor individuen (met UI) in de thuissituatie worden geschat op 6,5 miljoen euro.^[3]



De Urimed® Vision externe katheter voor mannen ondersteunt jouw patiënten in het omgaan met urine-incontinentie en verbetert zo de levenskwaliteit van je patiënten.



Verbeteringen in kwaliteit van leven, door het gebruik van mannelijke externe katheters zijn aangetoond in een klinische studie:

- Externe katheters hebben een positieve invloed aangetoond op de kwaliteit van leven bij matig tot ernstig incontinentie mannen.^[4]
- Mannen geven de voorkeur aan een externe katheter in plaats van absorberende materialen.^[4]



Urimed® Vision

Effectief management van incontinentie met behoud van een actief leven

De Urimed® Vision is eenvoudig aan te brengen, efficiënt en betrouwbaar. De externe katheter kan zowel thuis als in een klinische omgeving worden toegepast.



Onderscheidende prestaties

- Ten opzichte van vergelijkbare producten op de markt.

Geweldige resultaten op het gebied van:

- Waterdampdoorlaatbaarheid, de huid kan goed ademen.
- Voldoende kleefkracht over de gehele katheter waardoor de katheter niet zomaar afschuift.
- Boordrand die verstevigd is kan een beter draagcomfort geven.

Voordelen

Minder risico op lekkage en stagnatie

- Goede kleefkracht houdt product op zijn plaats.
- Soepele, anti-draai boordrand is ontworpen om de doorstroming te bevorderen waardoor stagnatie in de urinebuis voorkomen wordt.

Huidvriendelijk kathetermateriaal

- De hoge huidtolerantie van silicone minimaliseert allergische reacties.^[5]
- De conditie van de huid is eenvoudig te controleren omdat het materiaal transparant is.

Effectief pas- en meetsysteem

- De los verkrijgbare meters en de meegeleverde meter helpt je bij het kiezen van de juiste maat.
- Keuze uit 15 verschillende katheters, variërend in lengte en diameter, zorgt voor een goede pasvorm.

Betrouwbare oplossing voor dag en nacht

- Geeft 24 uur onafhankelijkheid.
- Kan worden aangesloten op diverse Urimed®-urineopvangzakken.

Slimme tools in de verpakking

Meter voor het bepalen van de juiste maat.



30 stuks individueel verpakt, handig om discreet mee te nemen.




Uitwasbaar handdoekje om om de penis te leggen tijdens het aanbrengen, om te voorkomen dat schaamhaar vastkleeft. Scheren is niet nodig.




Kies de juiste externe katheter

Selecteer een passende Urimed® Vision

1 Bepaal lengte en diameter met de meegeleverde meter

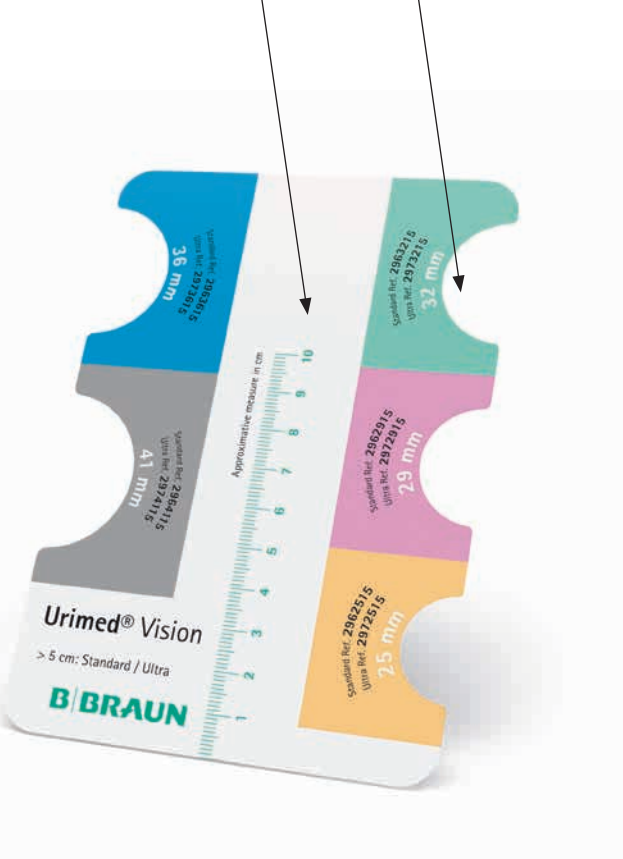

2 Kies het juiste product op basis van je meetresultaat

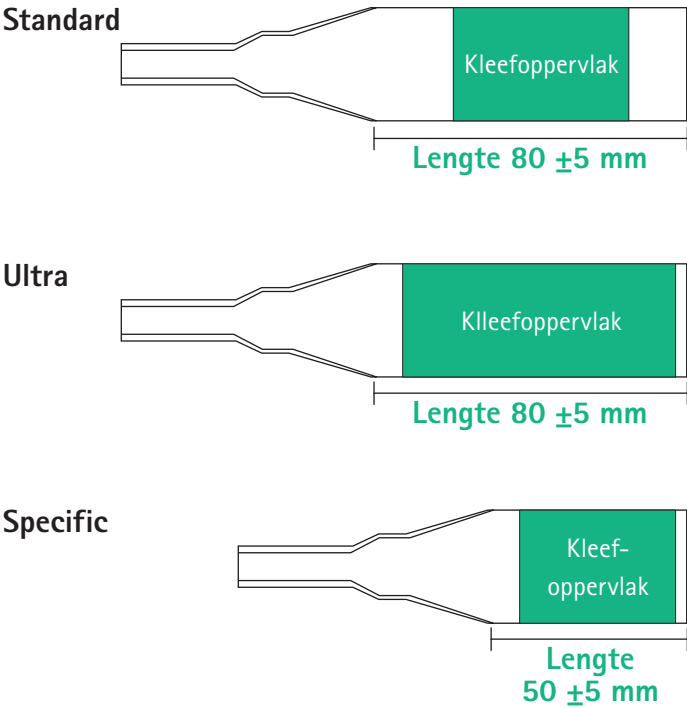

3 Bepaal welke katheter geschikt is

Maat	Product	Referentie
25 mm	Urimed® Vision Standard	2962530A
	Urimed® Vision Ultra	2972530A
	Urimed® Vision Specific	2982530A
29 mm	Urimed® Vision Standard	2962930A
	Urimed® Vision Ultra	2972930A
	Urimed® Vision Specific	2982930A
32 mm	Urimed® Vision Standard	2963230A
	Urimed® Vision Ultra	2973230A
	Urimed® Vision Specific	2983230A

Maat	Product	Referentie
36 mm	Urimed® Vision Standard	2963630A
	Urimed® Vision Ultra	2973630A
	Urimed® Vision Specific	2983630A
41 mm	Urimed® Vision Standard	2964130A
	Urimed® Vision Ultra	2974130A
	Urimed® Vision Specific	2984130A

4 Kies een geschikte opvangzak

Aan de hand van de toepassing, dag of nacht of beide, en de hoeveelheid urine

☀ dag 🌙 nacht 🥛* 1 glass = 250 mL

☀ 🥛



Urimed® Bag Plus Volume: 0.5 L

☀ 🥛🥛



Urimed® Tribag Plus Volume: 0.8 L

☀/🌙 🥛🥛🥛🥛



Medicare®
Urimed® Bag Volume: 2 L
Urimed® Bag Plus Volume: 1.5 L

* Volume dagelijks urineverlies

5 Kies eventueel een accessoire



Beenzak accessoire



Nachtzak accessoire



Bestelinformatie

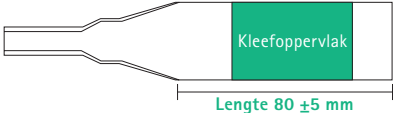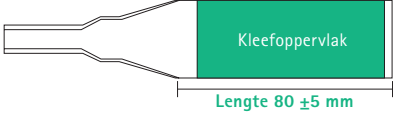Productversie	Maat	Aantal/doos	Referentie	Z-indexnummer
Urimed® Vision Standard 	25 mm	30	2962530A	16198352
	29 mm	30	2962930A	16198360
	32 mm	30	2963230A	16198379
	36 mm	30	2963630A	16198387
	41 mm	30	2964130A	16198395
Urimed® Vision Ultra 	25 mm	30	2972530A	16198409
	29 mm	30	2972930A	16198417
	32 mm	30	2973230A	16198425
	36 mm	30	2973630A	16198433
	41 mm	30	2974130A	16198441
Urimed® Vision Specific 	25 mm	30	2982530A	16198336
	29 mm	30	2982930A	16198344
	32 mm	30	2983230A	16198468
	36 mm	30	2983630A	16198476
	41 mm	30	2984130A	16198484

Urinezakken	Product	Lengte slang	Ø Slang	Aantal/doos	Referentie	Z-indexnummer
Voor dag	Urimed® Bag Plus 0.5 L	60 cm ✂	9 mm	10	28501A	15832074
	Urimed® Tribag Plus 0.8 L	60 cm ✂	9 mm	10	28306	15822915
Voor dag en nacht	Urimed® Bag 2 L	120 cm ✂	9 mm	10	28300A	15826236
	Urimed® Bag Plus 1.5 L	90 cm ✂	9 mm	10	28150A	15378632

Accessoires	Product	Maat	Aantal/doos	Referentie	Z-indexnummer
Beenzak accessoires	Urimed® Straps		1 paar	68551	15820335
Nacht accessoires	Urimed® Handle	Small	1	68548R	15859142

Referenties

- Irwin DE, Kopp ZS, Agatep B, Milsom I, Abrams P. Worldwide prevalence estimates of lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction. *BJU Int.* 2011 Oct;108(7):1132-8. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09993.x. Epub 2011 Jan 13. PMID: 21231991.
- Shamliyan TA, Wyman JF, Ping R, Wilt TJ, Kane RL. Male urinary incontinence: prevalence, risk factors, and preventive interventions. *Rev Urol.* 2009 Summer;11(3):145-65. PMID: 19918340; PMCID: PMC2777062
- Stothers L, Thom D, Calhoun E. Urologic diseases in America project: urinary incontinence in males--demographics and economic burden. *J Urol.* 2005 Apr;173(4):1302-8. doi: 10.1097/01.ju.0000155503.12545.4e. PMID: 15758786.
- Chartier-Kastler E, Ballanger P, Petit J, Fourmarier M, Bart S, Ragni-Ghazarossian E, Ruffion A, Le Normand L, Costa P. Randomized, crossover study evaluating patient preference and the impact on quality of life of urisheaths vs absorbent products in incontinent men. *BJU Int.* 2011 Jul;108(2):241-7. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09736.x. Epub 2010 Oct 15. PMID: 20950307
- Lund HG, Turkle J, Jewell ML, Murphy DK. Low Risk of Skin and Nipple Sensitivity and Lactation Issues After Primary Breast Augmentation with Form-Stable Silicone Implants: Follow-Up in 4927 Subjects. *Aesthet Surg J.* 2016 Jun;36(6):672-80. doi: 10.1093/asj/sjv266. Epub 2016 Apr 26. PMID: 27118002; PMCID: PMC5127413.

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 672 411 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.